


Ce masque, fourni par la **Communauté d'Agglomération Pays Basque**, est homologué par la **Direction Générale de l'Armement du Ministère des Armées** et répond aux exigences techniques de la norme **AFNOR SPEC S76-001**.

Le port du masque est **complémentaire** des indispensables **gestes barrières** et du respect des règles civiques de **distanciation physique**.



UTILISATION DU MASQUE

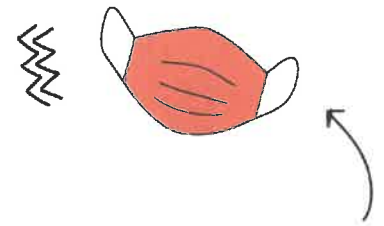

1. Le temps de port de ce masque est limité à **4h**
2. **Lavez-vous les mains** avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique **avant et après** toute manipulation du masque
3. Attrapez le masque **par les élastiques** pour le placer sur votre visage ainsi que pour le retirer
4. En fonction de votre morphologie, **ajustez les élastiques** en les nouant
5. Positionnez le masque de manière à bien recouvrir le **nez et le menton**
6. Une fois le masque positionné, **évittez de le toucher** et, de manière générale, de vous toucher le visage



ENTRETIEN DU MASQUE



1. Lavez le masque **avant le premier usage**
2. Puis lavez le après **chaque utilisation**
3. Après utilisation, il est préférable d'**isoler le masque** dans un sac réutilisable en attendant de le laver
4. Lavez le masque à **60° minimum** pendant 30 minutes (ne pas le faire bouillir)
5. **Séchez le masque complètement** (de préférence dans un sèche-linge ou à l'aide d'un sèche-cheveux)

Ces masques en tissus peuvent être réutilisés et lavés entre 15 et 20 fois minimum.